


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

MyClean® Wipes

Premium

Trockene Vliestuchrolle

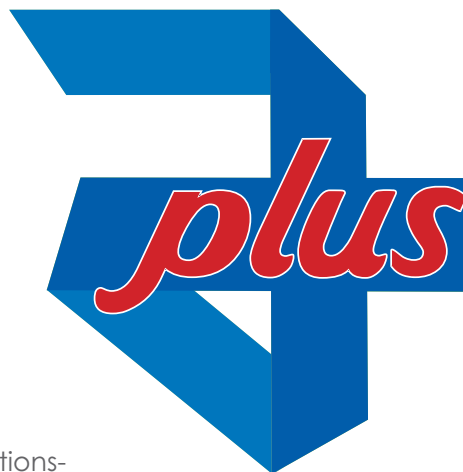

- Zur Anwendung in Kombination mit einem geeigneten Desinfektionsmittel und Spendersystem
- Mit Lochung für optimales Tränkverhalten

Anwendung:

MyClean® Wipes premium trockene Vliestuchrolle in wiederbefüllbares Spendersystem einlegen und mit 1,5-2,5 Liter der gebrauchsfertigen Desinfektionslösung tränken. MyClean® Wipes premium trockene Vliestuchrollen sind sowohl für die Anwendung in Kombination mit Flächen-, als auch mit Schnelldesinfektionsmitteln geeignet, insbesondere für : MyClean® DS, MyClean® DS OA, MyClean® FD-Gebrauchslösung (alle 4-Felder-Test), MyClean® DS A.

Ausführungen:

MyClean® Wipes premium

Artikelbeschreibung	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Vliestuchrolle, trocken, premium L	15 x 30cm	140 Blatt	179627	4046153116515	10305982	8
Vliestuchrolle, trocken, premium XXL	29 x 30cm	70 Blatt	79628	4046153116478	10305953	10
Vliestuchrolle, trocken, premium XXL	29 x 30cm	90 Blatt	179629	4046153116492	10305976	8

Hinweise:

Auf dem beiliegenden Etikett sind folgende Eintragungen zu machen: Produktname des Desinfektionsmittels, die Chargennummer, Konzentration, Einwirkzeit, Datum der Befüllung sowie Haltbarkeitsdatum der Befüllung (max. 28 Tage).

Das Etikett ist gut sichtbar auf dem Eimerdeckel oder an geeigneter Stelle anzubringen. Beachten Sie hierzu auch die Gebrauchsanweisung und die Gefahrenhinweise der verwendeten, gebrauchsfertigen Lösung.

Verwendbarkeit:

 3 Jahre

Symbole:



 MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany
TD-MyClean-Wipes-premium-20161125